

Administratorenleitfaden für Neukunden (TZ)

Was Sie als Systemadministratoren über Dr. Wolff TZ Version 8.00/8.10 wissen sollten:

- Die erstmalige Lizenzierung ist inklusive, eine Testinstallation kann gesondert beauftragt werden
- Das Programm ist eine 1 User Lizenz, eine Terminal-Server Installation ist ausgeschlossen.
- Das Programm und die Datenbank können auf dem Server oder Lokal installiert werden. Wir raten jedoch zu einer lokalen Installation. Die Datensicherungen können aber natürlich auf den Server verlegt werden. Sie finden die Datensicherungen als ZIP-File im Unterverzeichnis \save
- Es kann eine automatisierte Datensicherung eingerichtet werden - bitte bei Bedarf anfragen.

Was wir voraussetzen:

- Version TZ 8.00 setzt Betriebssystem Windows Vista/7/8 voraus.
- Version TZ 8.10 setzt Betriebssystem Windows 7/8/10 voraus. Für den Betrieb unter Windows 10 müssen Bestandskunden ein Updatepatch auf 8.10 erwerben.
- Für Dr. Wolff TZ für den **Präventionspark** gilt:
Die Auflösung des Monitors sollte 1980 x 1024 betragen – Anzeige von 8 Geräten möglich. Sollte Ihr Laptop/Monitor nur 1600x900 schaffen, werden nur 6 Geräte angezeigt.
- Für Dr. Wolff TZ ohne Präventionspark (nur **Back-check oder Leg-check**) gilt:
Die Auflösung des Monitors sollte 1600 x 900 betragen. Optimale Anzeige! 15 Zoll Laptops schaffen oft weniger! Sie müssen dann in der Maske ständig mit der Maus verschieben, da ständig gebrauchte Funktionstasten nicht sichtbar sind.
- Anzeige muss auf 100 % eingestellt sein.
- DSL Fernwartung bei Störungsfällen. http://tz80.de/files/ProFit_Fernwartung_MTM.exe
- Der PC muss mit einer aktivierten Ethernet-Netzwerkkarte ausgestattet sein.
- Wenn Sie die Datenbank am Server abgelegt oder das Kundenterminal zusätzlich als Kundenstation einsetzen, muss die Vernetzung über LAN vorgenommen sein. WLAN und dLAN, sowie Vernetzung über VPN sind ausdrücklich ausgenommen!
- Nach der Lizenzierung der Software müssen Sie Vollzugriff auf die nach der Installation angelegten Registryschlüssel HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Devices und HKEY_USERS\DEFAULT\Software\TZ70 vergeben.
- Vollzugriff auf das Programm- und Datenverzeichnis
- Der PC muss zwei freie USB Schnittstelle haben.

Was wir empfehlen:

- Bei Dateiablage auf einem anderen Rechner oder Mehrplatzlizenz müssen Sie die Vernetzung mit 1000 MBit über LAN durchführen – mit 10/100 Mbit ist das zu langsam.
- Wöchentliche externe Datensicherung der ZIP Files aus dem Verzeichnis \save

Weitere Informationen zur Ausführung der Software erhalten Sie gesondert mit der Installationsanleitung.